


## Durchführung eines Mundschleimhautabstriches

Bei der Durchführung eines Schleimhautabstriches in der Mundhöhle sind einige Punkte bei der Probenentnahme zu beachten, um die Qualität und Aussagekraft der Untersuchung zu gewährleisten. Wir bitten Sie daher, die unten genannte Durchführung sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Beim Schleimhautabstrich werden Zellen aus der Mundschleimhaut mit Hilfe eines speziellen Abstrichtupfers entnommen. Dieses Material wird anschließend im Labor analysiert. Je Person werden zwei etikettierte Abstriche versandt.

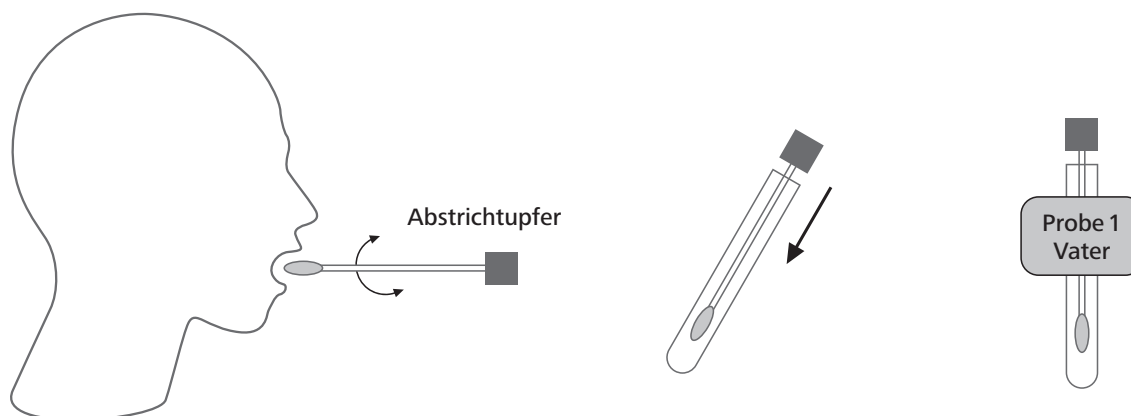

**Für eine sorgfältige Entnahme müssen folgende Punkte unbedingt beachtet werden:**

1. Für jede Person muss ein **frischer Abstrichtupfer** mit der zugehörigen **Fallnummer** verwendet werden.
2. Bitte je Proband frische Handschuhe verwenden, um eine Kontamination am Abstrich zu vermeiden.
3. Mindestens 1 Stunde vor der Probegewinnung sollte keine Nahrung verzehrt werden, kein Kaugummi gekaut und nicht geraucht werden, ggf. muss der Mund mit Leitungswasser ausgespült und ca. 15 Minuten gewartet werden.
4. Von jeder Person müssen zwei Abstriche entnommen werden, z. B. von der rechten und linken Wangeninnenseite.
5. **Der Abstrichtupfer wird mit deutlichem Druck auf der Wangeninnenseite ca. 10 – 15-mal auf- und abgerieben und dabei gedreht.**
6. Nach der Entnahme wird der Tupfer in dasselbe Probengefäß zurückgesteckt (siehe Grafik), dieses Verfahren gewährleistet einen sauberen Transfer der Probe in unser Labor.

Stand März 2017